

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE			
Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "MBI KUSHTET TEKNIKE TE PRANIMIT TE KAMPIONEVE"			
MOD.	40-LD-002	RISH.	01 SHËNDETI I KAFSHËVE – SËMUNDJE VIRALE KAFSHË
PMS	20-LD-001	FAQJA 1	nga 5 DATA: 12.09.2023

Nr.	Lloji I kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i I Provës (POS)	Teknika	Matrica	Kriteret teknike			
						Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi
1	Derra	Diagnoza e Murtajës Afrikane të Derrit	Zbulim Virusi me Real Time PCR 10-BM-004	Biologji Molekulare	Organe (trake, mushkri, qeska ajri, zorrë, shpretka, veshka, mëlçi, zemër)	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë	
					Gjak	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	2 mL	5
			Testi i Hemoadorbimit (HAD) 10-DV-030	Serologjike	Gjak/serum, Tonsile, nyje limfatike, shpretk, veshke	Frigobox 4-8° C	Vacutainer me EDTA	5 mL	
			Identifikimi i Virusit 10-DV-047	Izolim virusi në linja qelizore	Gjak/serum, Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë	Frigobox 4-8° C	Gjaku në Vakutainer me EDTA	5 mL	
			Testi zbulimit të antitropave fluoreshent (FAT) 10-DV-047	Serologjike	Tonsile, nyje limfatike, shpretk, veshke	Frigobox 4-8° C		5 mL	
			Metoda ELISA për antitropa Indirekte 10-DV-048	Serologjike	Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	
		Testi DAS ELISA për Antigenin 10-DS-031	Serologjike	Gjak, nyje limfatike, shpretkë	Frigobox 4-8° C	Gjaku në Vakutainer me EDTA	5 mL (gjak)		
2	Derra	Diagnoza e Murtajës Klasike të Derrit	Izolimi & Identifikimi i Virusit ne Kulturat Qelizore duke perdorur antitropat sekondare te konjuguar me peroksidaze 10-DV-029	Izolim virusi në linja qelizore	Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë	Frigobox 4-8° C	Qese ose gota plastike		
			Izolimi i virusit ne Linja Qelizore 10-DV-042	Izolim virusi në linja qelizore	Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë, gjak	Frigobox 4-8° C	Gjaku në Vakutainer me EDTA	5 mL (gjak)	
			Testi zbulimit të antitropave fluoreshent (FAT) 10-DV-003	Serologjike	Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë	Frigobox 4-8° C			
			Testi indirekt I zbulimit të antitropave fluoreshent (IFAT) 10-DV-004	Serologjike	Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë	Frigobox 4-8° C			
			Metoda ELISA për antitropat 10-DS-033	Serologjike	Serum, Plazëm	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)		1
			Metoda ELISA për antigenin 10-DS-032	Serologjike	Tonsile, nyje limfatike, shpretkë, veshkë	Frigobox 4-8° C			

3	Derra	Diagnoza e Aftës Epizootike (FMD)			Organe (trake, mushkri, qeska ajri, zorrë, shpretka, veshka, mëlçi, zemër)	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë	
			Zbulimi i virusit të Aftës Epizootike me REAL TIME RT-PCR 10-BM-006	Biologji Molekulare	Rrjedhje nazale	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 mL	5
					Gjak	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	2 mL	5
					Rrjedhje nga sytë	Frigobox 4-8° C	Tampon steril, në enë sterile	1 tampon	1-2
					Lezione erozive/ membrana të gojës	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 lezion/2 membrana	1-10
		Zbulimi dhe Tipizimi i Viruseve me ELISA për antigenin 10-DV-035	Serologjike	Epitelium dhe likuid nga gjuha dhe thundra	Frigobox 4-8° C				
		Metoda ELISA Kompetitive FMDV NSP (Ab Kunder Proteines Jo-Strukturore) 10-DV-036	Serologjike	Gjak/Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	
		Metoda ELISA Kompetitive FMDV SP (Ab Kundër Proteines Strukturore) 10-DV-037	Serologjike	Gjak/Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	
4	Derra	Diagnoza e Aujeskut (Pseudo-Tërbimi) (VSA)	Testi zbulimit të antitropave fluoreshent (FAT) 10-DV-001	Serologjike	Tonsile, shpretkë	Frigobox 4-8° C			
5	Derra	Diagnoza e Sindromit Riprodhues dhe Respirator në Derra (PRRS)	Metoda ELISA për antitropat - indirekt 10-DS-039	Serologjike	Gjak/Serum, Plazëm	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
6	Derra	Diagnoza e Gripit të Derrit Tipi A	Metoda ELISA për antitropat 10-DS-030	Serologjike	Gjak/Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
			Metoda ELISA për antigenin	Serologjike	Gjak, pjesë nga mushkri	Frigobox 4-8° C	Gjaku në Vakutainer me EDTA	5 mL	1
			Izolim virusi	Në linja qelizore	Gjak, pjesë nga mushkri, Tampon nazale	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
7	Derra	Diagnoza e Parvovirozës së Derrit	Testi i Antitropave Fluoreshencës direkte 10-DV-049	Serologji	Pjesë nga mushkëria e fetusit, ileumi, tonsilet, shpretka	Frigobox 4-8° C			
			Testi HA dhe HAP 10-DV-007	Serologjike	Pjesë nga mushkëria, ileumi, tonsilet, shpretka e fetusit. Gjak nga nëna (viremi)	Frigobox 4-8° C	Gjaku në Vakutainer me EDTA	5 mL	1

8	Derra	Diagnoza e Encefalomielitit Infektiv te Derrit (Teschen)	Metoda e shpejte me ngrirje per diagnozen Teschen-it (10-HP-009)	Histopatologjike	Tru	Frigobox 4-8° C			
9	Kafshë #	Diagnoza e Tërbimit	Zbulimi virusit Real-time RT-PCR 10-BM-007	Biologji Molekulare	Organe (trake, mushkri, qeska ajri, zorrë, shpretka, veshka, mëlçi, zemër)	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë	
					Gjak	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	2 mL	5
			Testi zbulimit të antitropave fluoreshent (FAT) 10-DV-039	Serologjike	Kokë (briri I Amonit, truri i vogël, palca e zgjatur), gjëndrat e pështymës	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
			Testi i inokulimit në minjë (Mous Inoculation Test) 10-DV-054	Test biologjik	Ind nga truri	Frigobox 4-8° C			
			Izolimi i virusit ne linjen qelizore neuroblastoma (N2a, BHK 21) 10-DV-041	Izolim virusi në linja qelizore	Ind nga truri ose i liofilizuar	Frigobox 4-8° C			
			Metoda ELISA për antitropat 10-DV-040	Serologjike	Gjak, letër filtri	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
			Zbulimi i Tetraciklinës në dhëmbët e dhelprave të vaksinuara kundër TERBIMIT me anën e testit FAT 10-DV-046	Serologjike	Dhëmb				
Metoda e ngjyimit me Gimsa 10-HP-016	Mikroskopike	Ind nga truri (briri i Amonit, truri i vogël dhe palca e zgjatur)	Frigobox 4-8° C						
10	Ripërtypës	Diagnoza e Gjuhës Blu në kafshet ripertypese	Izolimi virusit	Izolimi virusit në vezet e embrionuara (ECE)	Gjak i pa koagulluar, shpretkë, gjëndra limfatike	Frigobox 4-8° C	Gjaku në vacutainer me EDTA		
			Izolimi virusit 10-DV-051	Izolimi virusit në linjen qelizore BHK 21/VERO	Gjak i pa koagulluar, shpretkë, gjëndra limfatike	Frigobox 4-8° C	Gjaku në vacutainer me EDTA		
			Testi AGID 10-DV-050	Serologjike	Serum	Frigobox 4-8° C		5 mL	1
			Metoda ELISA për antigenin 10-DV-034	Serologjike	Gjak i pa koagulluar, shpretkë, gjëndra limfatike	Frigobox 4-8° C	Gjaku në vacutainer me EDTA	5 mL	1
			Metoda Metoda ELISA për për antitropat 10-DS-021	Serologjike	Gjak/Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
11	Gjedh	Diagnoza e LSD (Dermatoza Nodulare e Gjedhit) - Capripoxvirus	Izolim virusi me Real- time PCR 10-BM-001	Biologji Molekulare	Rjedhje nazale	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1ml	5
					Rjedhje nga sytë	Frigobox 4-8° C	Tampon steril, në enë sterile	1 tampon	1-3
					Gjak	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	2 mL	5
					Nodula	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 nodul	1-2
					Kruste	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	2 kruste	2-10

12	Gjedh	Diagnoza e Rinotrakeitit infektiv te gjedhit (IBR)	Metoda Metoda ELISA për për antitrupe 10-DS-022	Serologjike	Gjak/Serum, Plazëm	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
13	Gjedh	Diagnoza e Diarësë Virale të Gjedhit (VBVD)	Metoda ELISA për antigenin 10-DS-023	Serologjike	Gjak/Seerum, plazëm, ind i veshit	Frigobox 4-8° C	Gjaku në vacutainer me EDTA		
14	Gjedh	Diagnoza e Leukozës së Gjedhit	Testi AGID 10-DV-053	Serologjike	Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
15	Gjedh	Diagnoza e Coronavirusëve të Gjedhit	Metoda ELISA për antigenin 10-DS-024	Serologjike	Fece	Frigobox 4-8° C			
16	Gjedh	Diagnoza e Diarësë së Viçave nga Rotavirusët në Gjedh	Metoda ELISA për antigenin 10-DS-025	Serologjike	Fece	Frigobox 4-8° C			
17	Të imta	Diagnoza e Murtajës së Dhenëve dhe dhive (PPR)	Izolim virusi me Real-time PCR 10-BM-003	Biologji Molekulare	Rjedhje nazale	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1ml	5
					Lezione erozive/ membrana të gojës	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 lezion/2 membrana	1-10
					Rrjedhje nazale, rrjedhje nga sytë, lezione erozive dhe membrana të gojës etj	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak		
			Metoda ELISA për antitrupe 10-DS-020	Serologjike	Gjak/serum, plazëm	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
18	Të imta	Diagnoza e Artrit Encefaliteve në Dhi (CAE) dhe MAEDI-VISNA/Pneumonia Progressive e Dhenve (MV)	Testi AGID 10-DV-005	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
			Metoda ELISA për antitrupe 10-DV-006	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
19	Kuaj	Diagnoza e Virusit te Nilit Perendimor në Kuaj (Z)	Metoda ELISA për antitrupe (IgM,IgG) 10-DS-029	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
20	Kuaj	Diagnoza e Anemisë Infektive të Kuajve (EIA)	Testi AGID 10-DV-052	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
			Metoda ELISA për antitrupe Ab 10-DS-034	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1

21	Kafshë	Diagnozë Sëmundje Virale	Analize citologjike 10-HP-012	Teknika Mikroskopike e përgatitjes së mostrave për analiza citologjike	Urinë; liquidi cerebrospinal, torakal, abdominal; organe	Frigobox 4-8° C			
22	Kafshë	Diagnozë Sëmundje Virale	Nekropsi		Karkasë kafshë/shpend	Frigobox 4-8° C			

Koha e testimit: për testet Serologjike, Histopatologjike dhe Molekulare është 1-2 ditë pune; Për metodat izolimit të viruseve (linja qelizore) përdoren në rastet e rikonfirmimeve kur kemi shpërthime të sëmundjeve në vend dhe për studime shkencore.

Referenca laboratorikë është Manulai Diagnostik I OIE dhe WHO.

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "MBI KUSHTET TEKNIKE TE PRANIMIT TE KAMPIONEVE"			
MOD.	40-LD-002	RISH.	01 SHËNDETI I KAFSHËVE – SËMUNDJE VIRALE SHPEND
PMS	20-LD-001	FAQJA 1 nga 3	DATA: 12.09.2023

Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i I Provës (POS)	Teknika	Matrica	Kriteret teknike				
						Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi	
1	Shpend	Diagnoza e INFLUENCES AVIARE në shpendë	Real-time RT-PCR 10-BM-002	Biologji Molekulare RT-PCR	Organe (trake, mushkri, qeska ajri, zorrë, shpretka, veshka, mëlçi, zemër)	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë		
					Rjedhje nazale	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 mL	5	
					Gjak	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	2 mL	5	
					Rjedhje nga sytë	Frigobox 4-8° C	Tampon steril, në enë sterile	1 tampon	1-2	
					Tampon kloakal	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	1 tampon	1-2	
			Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-012	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	
			Zbulimi i Ab. të Tipit A me AGID 10-DV-008	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	
			Reaksioni i HA dhe HAP 10-DS-028	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	
			Izolim virusi në vezë të embrionuara	Izolimi virusit në vezët e embrionuara	Ekstrakti i 5 tamponeve kloakal ose orofaringal në 3mL BHI (Infuzion i trurit dhe zemrës) pa antibiotik ose në 3 mL PBS pa antibiotik.	Frigobox 4-8° C				
					Organe: 3g (mostër mesatare "pool") ind respirator enterik dhe riprodhues në 5 mL BHI (Infuzion i trurit dhe zemrës) pa antibiotik ose në 5 mL PBS pa antibiotik.	Frigobox 4-8° C				
			Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-037	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	
			Reaksioni i HA dhe HAP 10-DS-038	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1	

2	Shpend	Diagnoza e sëmundjes së PSEUDOPESTIT ND (Newcastle Disease) në shpend	Izolimi virusi në vezë të embrionuara 10-DS-027	Izolimi virusit në vezet e embrionuara	Ekstrakti i 5 tamponëve kloakal ose orofaringal në 3 mL BHI (Infuzion i trurit dhe zemrës) pa antibiotik ose në 3 mL PBS pa antibiotik.	Frigobox 4-8° C			
					Organe: 3g (mostër mesatare "pool") ind respirator enterik dhe riprodhues në 5 mL BHI (Infuzion i trurit dhe zemrës) pa antibiotik ose në 5 mL PBS pa antibiotik.	Frigobox 4-8° C			
3	Shpend	Diagnoza e sëmundjes së LARINGOTRAKEITI INFEKTIV në shpend	Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-026	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	1
			Analize histopatologjike me parafinim për sëmundjen e Laringo-Traketiti infektiv 10-HP-001	Histologjike		Frigobox 4-8° C			
			Me metodën e parafinimit 10-HP-002	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine (HE)		Frigobox 4-8° C			
4	Shpend	Diagnoza e sëmundjes së DIFTERIOVARIOLES (DV) në shpend (Lija e shpendëve)	AGID 10-DV-015	Serologjike	karkasë/lëkurë e infektuar	Frigobox 4-8° C			800
				Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	300
			Metoda ELISA për antitrupa 10-DV-015	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	
5	Shpend	Diagnoza e BRONKITI INFEKTIV në shpend	Izolimi virusi në vezë të embrionuara 10-DV-011	Izolimi virusit në vezet e embrionuara	Organe: 3g (mostër mesatare "pool") ind respirator enterik dhe riprodhues në 5 mL BHI (Infuzion i trurit dhe zemrës) pa antibiotik ose në 5 mL PBS pa antibiotik.	Frigobox 4-8° C			
			Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-035	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C			
			Testi AGID 10-DV-011	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C			
			Testi HAP 10-DV-011	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C			
			Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-018	Serologjike	Gjak/serum/Bursa e Fabricit	Frigobox 4-8° C			
			Testi AGID 10-DV-009	Serologjike	Gjak/serum/Bursa e Fabricit	Frigobox 4-8° C			

6	Shpend	Diagnoza e GUMBOROS (Bursal Disease) në shpendë (IBD)	Analize histopatologjike me ngrirje te thelle per semundjen e Gumboros 10-HP-003	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine (HE), per te gjitha strukturat e organeve	Organe	Frigobox 4-8° C			
			Analize histopatologjike me parafinim per semundjen e Gumboros 10-HP-002	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE), per te gjitha strukturat e organeve	Organe	Frigobox 4-8° C			
7	Shpend	Diagnoza e sëmundjes MAREK	AGID	Serologjike	Gjak/serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulante)	5 mL	
			Analize histopatologjike me ngrirje te thelle 10-HP-003	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE), per te gjitha strukturat e organeve	Të gjitha strukturat e organeve				
			me parafinim per semundjen e Marekut 10-HP-021	me Hematoksiline - Eozine (HE) me parafinim	Organe	Frigobox 4-8° C			
8	Shpend	Diagnoza e Leukozës në shpend	Analize histopatologjike me ngrirje te thelle per Leukozen e shpendeve 10-HP-003	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE), per te gjitha strukturat e organeve dhe semundjet	Organe	Frigobox 4-8° C			
			Analize histopatologjike me parafinim per Leukozen e shpendeve 10-HP-002	Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE), per te gjitha strukturat e organeve dhe semundjet	Organe	Frigobox 4-8° C			
9	Shpend	Diagnoza #	Nekropsi		Karkasë kafshë/shpend	Frigobox 4-8° C			

Koha e testimit: për testet Serologjike, Histopatologjike dhe Molekulare është 1-2 ditë pune; Për metodat izolimit të virusëve (SPF vezë) përdoren në rastet e rikonfirmimeve kur kemi shpërthime të sëmundjeve në vend dhe për studime shkencore.

Referenca laboratorikë është Manulai Diagnostik I OIE dhe WHO.

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "MBI KUSHTET TEKNIKE TE PRANIMIT TE KAMPIONEVE"			
MOD.	40-LD-002	RISH.	01 SHËNDETI I KAFSHËVE – SËMUNDJE BAKTERIALE-MYKOTIKE
PMS	20-LD-001	FAQJA 1 nga 5	DATA: 12.09.2023

Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i I Provës (POS)	Teknika	Matrica	Kriteret teknike			
						Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njesi
1	Gjedh/të imta	Diagnoza e Plasjes	Izolimi i <i>B.anthtax</i> , bioprovë 10-DB-008	Metodë Mikrobiologjike (kulturale) mikroskopike, biologjike)	Soil/Ekskretime/Gjak/Muskul/Organe	Frigo-box 4-8°C			
2	Të imta	Diagnoza e Agalaksisë Kontagioze	Izolim i mykoplazmave shkakëtare të Agalaksisë në kafshë 10-DB-010	Kulturale dhe Steremikroskopike	Ekskretime/Fetus/Organe/Qu mësh	Frigo-box 4-8°C			
3	Shpend	Diagnoza e Mykoplazmozës në shpend	Diagnostikimi i Mykoplazmozës në shpendë Izolim dhe identifikim i <i>M.gallisepticum</i> dhe <i>M.sinoviae</i> 10-DB-013	Analize kulturale, steremikroskopike, RSA	Organe/Serum	Frigo-box 4-8°C			
4	Gjedh	Diagnoza e Mykoplazmozës në gjedh	Diagnostikimi i Mykoplazmozës ne gjedh	Kulturale dhe Steremikroskopike	Ekskretime/Fetus/Organe/Qu mësh	Frigo-box 4-8°C			
5	Kafshë-shpend	Diagnoza e Enterotoksemisë (shkaktuar nga toxina të Clostridium perfringens)	Metodë Mikrobiologjike (kulturale), mikroskopike dhe biologjike 10-DB-014	Metodë Mikrobiologjike (kulturale) mikroskopike, biologjike)	Organe nga karkasa	Frigo-box 4-8°C			
			ELISA për Identifikimin e <i>Clostridium Perfringens</i> & toksinave Theta, Beta dhe Epsilon 10-DS-040	Serologjike	Përmbajtja e lëngshme e zorrëve, lëngu perikardial, peritoneal, supernatantët e kulturës.	Frigo-box 4-8°C			
6	Kafshë-shpend	Salmonelozë shkaktuar nga gjinia Salmonella (Nes turkoid)	Analize kulturale, biokimike, serologjike dhe me antibiogramë per Salmonelozat 10-DB-012	Mikrobiologjike me antibiogramë	Fetus/Organe/ materiale nga ambienti	Frigo-box 4-8°C			

		(non-typhoidal Salmonella)	Metoda e izolimit dhe identifikimit të Salmonella spp.	Diagnostikimi i Salmonelozave pa antibiogramë	Feçe /fetus/Organe/Soil/Tampon kloakal/tampon sipërfaqesh	Frigo-box 4-8°C				
7	Të imta	Diagnostikimi i Listeriozës	Diagnostikimi i Listeriozes	Metoda kulturale, mikroskopike, biokimike, antibiogramë	Fetus/Organe/Tru	Frigo-box 4-8°C				
8	Kafshë-shpend	Diagnostikimi i Kolibakteriozave (shkaktuar nga E. coli)	Diagnostikimi i Kolibakteriozave 10-DB-009	Metoda kulturale, mikroskopike, biokimike, antibiogramë	Fece/Organe/Fetus/Urinë	Frigo-box 4-8°C				
9	Gjadh	Diagnostikimi i Mastiteve	Identifikimi i patogenëve 10-DB-016	Metodë Mikrobiologjike me antibiogramë	Qumësht	Frigo-box 4-8°C				
10	Gjadh	Diagnostikimi i Paratuberkulozit në Ruminantë	Analize mikroskopike për Para TBC 10-DB-011	Mikroskopike	Diare/Kruarje/Zorrë	Frigo-box 4-8°C				
			Metoda ELISA për antitrupe 10-DS-013	Serologji	Serum	Frigo-box 4-8°C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5mL		
11	Gjadh	Diagnoza e Tuberkulozit TBC	Metoda ELISA për antitrupe 10-DS-019	Serologjike	Serum	Frigobox 4-8° C	Vacutainer (pa antikoagulant)	5mL		
			Real- time PCR 10-BM-005	Biologji Molekulare	Organe (trake, mushkri, qeska ajri, zorrë, shpretka, veshka, mëlçi, zemër)	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë		
					Mushkëri/gjëndra	Frigobox 4-8° C	Enë sterile me kapak	Organ i plotë		
			Diagnostikimi i Tuberkulozit	Metodë Mikrobiologjike (kulturale) mikroskopike)	Organe, nodula, qumësht	Frigobox 4-8° C				
			Metoda Ziell- Nelsen (10-HP-007)	(Mikroskopi)	Kruarje nga zorrët	Frigobox 4-8° C				

12	Gjedh	Diagnoza e Pasteurelozës	Identifikimi i shkaktarit të Pasteurelozës 10-DB-007	Metodë Mikrobiologjike izolim (kulturale/biokimike) Antibiogram	Organe/Tampon	Frigobox 4-8° C			
13	Shpend	Pasteureloza Aviare/ Murtaja Shpendëve	Diagnostikimi I Murtajes ne Shpend	Metodë Mikrobiologjike (kulturale/biokimike)	Organe/Tampon	Frigobox 4-8° C			
14	Derra	Diagnoza e Fruthit të Derrave	Diagnostikimi i Fruthit ne Derra	Metodë Mikrobiologjike izolim (kulturale, mikroskopike, Antibiogram)	Karkesë/Organe	Frigobox 4-8° C			
15	Kuaj	Diagnostikimi I Metriti Kontagjioz i Kuajve (Morva)	Diagnostikimi I Metriti Kontagjioz i Kuajve (Morva)	Metodë Mikrobiologjike izolim (kulturale, mikroskopike, Antibiogram)	Karkesë/Organe	Frigobox 4-8° C			
16	Peshq	Sëmundje bakteriale në peshq	Diagnostikimi i Semundjeve Bakteriale ne peshq	Metoda kulturale, mikroskopike, biokimike, antibiogram	Peshk	Frigobox 4-8° C			
17	Bletë	Diagnostikimi i Pestës Amerikane në bletë	Izolimi i shkaktarit të Pestes Amerikane	Metoda kulturale, mikroskopike	Hoje bletësh	Frigobox 4-8° C			
18	Bletë	Diagnostikimi i Pestës Europiane në bletë	Izolimi i shkaktarit të Pestës Europiane	Metoda kulturale, mikroskopike	Hoje bletësh	Frigobox 4-8° C			
19	Shpend	Korriza	Diagnostikimi i Korrizës infektive të shpendëve	Metodë Mikrobiologjike (kulturale/biokimike/mikroskopike dhe antibiogram)	Karkesë/Organe	Frigobox 4-8° C			
20	Shpend	Tifo dhe Puluroza e shpendëve	Diagnostikimi I Tifos dhe Pulurozës së shpendëve	Metodë Mikrobiologjike (kulturale/Serologjike/ biokimike, antibiogram)	Karkesë/Organe	Frigobox 4-8° C			
			Metoda ELISA për antitropa Ab10-DS-017	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8°C	Vacutainer (pa antikoagulant)	1ml (gjak) , 100 µl serum	

21	Të imta	Klamidioza	Testi i Fiksimit te Komplementit (RLK) 10-DS-006	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8 ^o C	Vacutainer (pa antikoagulant)	1ml (gjak) , 100 µl serum		
			Analize histopatologjike me parafinim 10-HP-001	Histopatologjike	Organe	Frigo-box 4-8 ^o C				
			Teknika May-Grunëald-Gimsa per abortet klamidike 10-HP-011	Histopatologjike	Organe	Frigo-box 4-8 ^o C				
22	Gjedh/të imta	Diagnoza e Ethes Q	Metoda ELISA për antitrupa 10-DS-015	Serologjike	Gjak/serum	Frigo-box 4-8 ^o C	Vacutainer (pa antikoagulant)	1ml (gjak) , 100 µl serum		
			Testi i Fiksimit te Komplementit (RLK) 10-DS-007	Serologjike	Gjak/serum	Frigo-box 4-8 ^o C	Vacutainer (pa antikoagulant)	1ml (gjak) , 100 µl serum		
23	Gjedh/të imta	Diagnoza e Brucelozës	Testi i fiksimit te komplementit 10-DS-001	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8 ^o C	Vacutainer (pa antikoagulant)	1ml (gjak) , 100 µl serum		
			Testi i Aglutinimit te Shpejte (Rose-Bengal) 10-DS-002	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8 ^o C	Vacutainer (pa antikoagulant)	1ml (gjak) , 100 µl serum		
			Testi i aglutinimit të ngadalhtë 10-DS-003	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8 ^o C	Vacutainer (pa antikoagulant)	1ml (gjak) , 100 µl serum		
			Testi i Unazës se Qumeshtit 10-DS-004	Serologjike	Qumësht	Frigo-box 4-8 ^o C	tuba plastike me kapak te sigurte	2ml		
			Metoda ELISA për antitrupa në serum 10-DS-005	Serologjike	Gjak	Frigo-box 4-8 ^o C	Vacutainer (pa antikoagulant)	1ml (gjak) , 100 µl serum		
			Metoda ELISA për antitrupa në cisternat e qumështit të gjedhit 10-DS-016	Serologjike	Qumësht	Frigo-box 4-8 ^o C	tuba plastike me kapak te sigurte	2ml		
			izolimit dhe identifikimit të gjinisë Brucella 10-DB-006	Analize kulturale, mikroskopike, biokimike	Karkesë/Fetus	Frigo-box 4-8 ^o C				
			Identifikimi I Brucella spp. Me metodën RT-PCR	Biologji molekulare (RT-PCR)	Organe/Eskretime/Kulturë	Frigo-box 4-8 ^o C				
			Tipizimi I Brucella spp. Me metodën PCR convencionale	Biologji molekulare (PCR convencionale)	Kulturë					

24	Kafshë	Diagnozë Sëmundje Baktoriale përveç atyre të specifikuara	Izolimi I shkaktarit	Metodë Mikrobiologjike (kulturale/biokimike & Antibiograme)	Fece/Material Biologjik/Organe/Peshk/Rrjedhje vaginale/Shtrese stalle/Tampone/Urinë	Frigobox 4-8° C			
25	Kafshë/Shpend	Diagnoza Sëmundje Baktoriale	Nekropsi		Karkasë kafshë/shpend	Frigobox 4-8° C			

Koha e testimit: për testet Serologjike, Histopatologjike dhe Molekulare është 1-2 ditë pune; Për testet Mikrobiologjike Kulturele 3-5 ditë pune me përjashtim të Agalaksisë dhe Brucelozës që shkon 5-10 ditë pune.

Referenca laboratorikë është Manuali Diagnostik OIE dhe WHO.

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "MBI KUSHTET TEKNIKE TE PRANIMIT TE KAMPIONEVE"			
MOD.	40-LD-002	RISH.	01 SHËNDETI I KAFSHËVE - SËMUNDJE PARAZITARE
PMS	20-LD-001	FAQJA 1	nga 2 DATA: 12.09.2023

Nr.	Lloji i kafshës	Diagnoza/Sëmundja	Emërtimi i I Provës (POS)	Teknika	Matrica	Kriteret teknike			
						Temperatura	Paketimi	Sasia minimale per njesi	Njësi
1	Kafshë	Diagnostikimi Anaplazma spp.	Metoda e ngjyrimit me Gimsa 10-DP-001	Mikroskopike	gjak/ strisho gjaku	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Strisho gjaku në viale plastike	2-3 strsho	
			Metoda Metoda ELISA për antitropa për Ab 10-DS-008	Serologjike	Serum	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Vakuntainer	5mL	
2	Gjedh	Diagnostikimi i Babezia spp.	Ngjyrim me Gimsa 10-DP-012	Mikroskopike		Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Strisho gjaku në viale plastike	2-3 strsho	
3	Kafshë	Diagnostikimi i Endoparazitëve (me peshë specifike të vogël)	Metoda e flotacionit 10-DP-004	Mikroskopike	Feçe/Zorrë	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik	10g	
4	Kafshë	Diagnostikimi i Endoparazitëve (me peshë specifike të madhe)	Metoda e sedimentimit të shpejte & metoda Berman 10-DP-005	Mikroskopike	Feçe	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik	10g	
5	Kafshë	Diagnostikimi i Endoparazitëve	Metode e shtrirjes direkte 10-DP-011	Mikroskopike	zorrë, organe	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik	10g	
6	Derra	Zbulimi i parazitit Trichinella spiralis në mishin e Derrit	Metoda e tretjes enzimatiske 10-DP-006	Mikroskopike	Mish derri	Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik, qese plastike e vogël me zip	100g	
7	Kafshë	Diagnoza e Zgjebes në Kafshë	Metode e shtrirjes direkte 10-DP-008	Mikroskopike	Kruste/qime/lëkurë	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik, qese plastike e vogël me zip	5g	
8	Bletë	Diagnostikimi i Nozematozës në Bletë	Metode Mikroskopike 10-DP-009	Mikroskopike	Bletë	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Viale plastike ose kuti kartoni	30 bletë të sëmura ose sapongordhura	
9	Bletë	Diagnostikimi i Varroatozës në Bletë	Metode Mikroskopike 10-DP-010	Mikroskopike	Bletë	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Viale plastike ose kuti kartoni	30 bletë të sëmura ose sapongordhura	
10	Qen	Diagnoza e Leishmania infatum në qen	Zbulimi i Antitropave kundër me metodën e imunofluoreshencës indirekte IFAT 10-DP-012	Serologjike	Serum	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Vakuntainer	5mL	

11	Peshq&P rodukte Iktike	Kërkimi dhe identifikimi i larvave Anisakidae në produktet iktike	Metoda e tretjes enzimatike 10-DP-013	Mikroskopike	Peshq, prodh. iktike të gjalla ose konservuara	Frigobox 4-8° C	Qese plastike me zip	1Kg	
12	Qen	Diagnoza e Neospora Caninum	Metoda ELISA për antitropa Ab 10-DS-009	Serologji	Gjak/Serum	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Vakuntainer	5mL	
13	Kafshë	Diagnoza e Toksoplazmozës	Metoda ELISA për antitropa Ab 10-DS-010	Serologji	Gjak/Serum	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Vakuntainer	5mL	
14	Peshq	Diagnostikimi I sëmundjeve Parazitare të peshqve	Metoda e shtrirjes direkte 10-DP-011	Mikroskopike	Peshk	Ambjenti, Frigobox 4-8° C	Kontenierë plastik	3 peshq	
15	Kuaj	Diagnoza e DOURIN	Ngjyrim Gimsa	Mikroskopike					

Koha e testimit: për testet Mikroskopike dhe Serologjike është 1-2 ditë pune.

Referenca laboratorikë është Manuali Diagnostik i OIE dhe EURL.